

# BRUKSANVISNING

Instruksjon for medisinsk splint  
5003000 Flexsplint

## Flexsplint Medisinsk splint / trekk splint

### Tiltenkt bruk :

Flexsplint er en fysisk støtte for skadde pasienter for å sikre eller støtte pasienter i førstehjelp eller fysioterapi. Medisinske splint bæres på pasientenes øvre eller nedre ekstremiteter for å støtte, korrigere eller justere kroppstruktur for funksjonell forbedring.

### Tiltenkte brukere:

Den medisinske splinten er ment for: Militærmedisin, prehospital bruk, friluftsliv, skipatroljer, veterinærer og mer.

### Brukerinstruksjoner:

Form den medisinske splinten till en passende form for å støtte den skadede kroppsdelen

Fest kroppsdelen og den medisinske splinten med bandasje eller tape

-Lett og kompakt

-Rask immobilisering av et skadd lem - vanntett

-Vannavvisende og radiolys

-Uten latex

### Rengjøring og desinfisering:

1. Rengjør splinten med varmt såpevann og en klut eller myk børste, eller tørk av med et mildt løsningsmiddel etter hver bruk og tørk det ved romtemperatur.

2. Tørk av alle overflater med et desinfeksjonsmiddel. Følg lokale retningslinjer for rengjøring, Skyll grundig av sterke vaskemidler etterpå.

**Lagring:** Unngå høy temperatur og fuktighet

**Holdbarhetstid:** Fem år



Advarsel

Bruk under veiledning av lege eller sykepleier



Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd.  
500 meter, Nan Sucun, Anping County, Hengshui City, Hebei-provinsen, 053600, Kina.



**MedNet EC- REP GmbH**  
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

**Distribusjon NORWAY:**  
Ferno Norden Norway AS  
Company reg.nr.: NO916230451  
www.fernonorden.no  
Phone: +47 33 03 45 00  
Address: Innlaget 298, 3185 Skoppum – Norway



Datum: 31 augusti 2020

Version: A / 1