



# SAM<sup>®</sup> Pelvic Sling II

SAM<sup>®</sup>  
MEDICAL


STABILISERER BEKKENBRUDD MED TRYGT OG EFFEKTIVT TRYKK

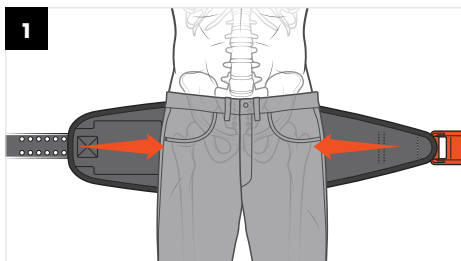

Plasser den **SVARTE STROPPEN** gjennom spennen, og dra den helt gjennom.

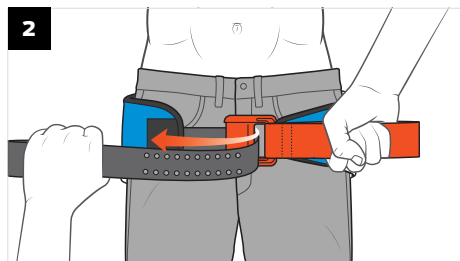

Fjern gjenstander fra pasientens lommer eller bekkenområde. Plasser SAM Pelvic Sling II med den svarte siden opp under pasienten i høyde med trokanterne (hoftene).

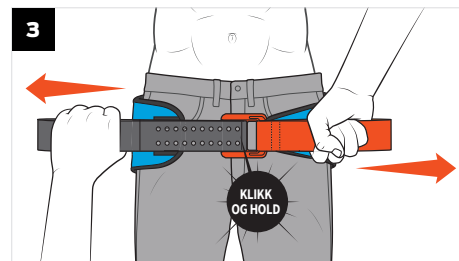

Hold den **ORANSJE STROPPEN (GRØNN STROPP)** på PS301-OD-EN og dra den **SVARTE STROPPEN** i motsatt retning til du hører og kjenner at spennen klikker. Hold den stramt og trykk umiddelbart den **SVARTE STROPPEN** mot overflaten på SAM Pelvic Sling II for å feste den.

**MERK:** Ikke bli bekymret hvis du hører et andre «klikk» etter at SAM Pelvic Sling II er festet. Velcro<sup>®</sup>-borrelåsen fester slyngen på plass ved riktig trykk, uansett hvor hardt spennen er festet.

**FOR Å FJERNE:** Løft den **SVARTE STROPPEN** ved å dra oppover. Hold den stramt og la SAM Pelvic Sling II løsne langsomt.

## BRUKSOMRÅDE:

SAM Pelvic Sling II er et ikke-invasivt, omslagsbekkenbelte beregnet på å stabilisere bekkenbrudd under transport til sykehus/akuttmottak.

**INDIKASJONER FOR BRUK:** SAM Pelvic Sling II er indisert for bruk av prehospitalt og medisinsk personale eller opplært personale på personer som har, eller mistenkes å ha, brudd i bekkenringen der det kan oppstå blødning.

**KONTRAINDIKASJONER:** Ikke bruk SAM Pelvic Sling hvis anatomiske referansemerker mangler.

## ⚠ FORHOLDSREGLER:

- Fjern gjenstander fra pasientens lommer og klær før bruk.
- Overvåk pasientens hud for trykkskader under bruk.
- Enheten er kun til engangsbruk.
- Gjenbruk av enheten kan medføre sykdom (f.eks. infeksjon) eller skade (reduisert ytelse).
- Kasser brukte enheter i henhold til helseinstitusjonens protokoll for biologisk fare.

**Melding til brukere og/eller pasienter i EU:** Alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten holder til.

|     |             |  |                       |                      |
|-----|-------------|--|-----------------------|----------------------|
| REF | PS300-OB-EN |  | LITEN Hofteomkrets    | 69–114 cm   27–45 in |
| REF | PS301-OB-EN |  | STANDARD Hofteomkrets | 81–127 cm   32–50 in |
| REF | PS302-OB-EN |  | STOR Hofteomkrets     | 91–137 cm   36–54 in |
| REF | PS301-OD-EN |  | STANDARD Hofteomkrets | 81–127 cm   32–50 in |

(NSN# 6515-01-509-6866)

SAM Medical Products<sup>®</sup>  
12200 SW Tualatin Rd, Ste 200  
Tualatin, OR 97062 USA

Emergo Europe, Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, Nederland

MedEnvoy Global BV  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123,  
2595 AA Haag, Nederland

sammedical.com

## MR-SIKKER UNDER VISSE BETINGELSER

Ikke-klinisk testing viste at SAM Pelvic Sling II er MR-sikker under visse betingelser (MR Conditional). En pasient med denne enheten kan skannes trygt i et MR-system under følgende betingelser:

- Statisk magnetfelt på 3 tesla eller mindre.

**Viktig merknad:** SAM Pelvic Sling II inneholder ferromagnetiske deler og må derfor festes godt på pasienten som gjennomgår en MR-undersøkelse. De ferromagnetiske delene kan påvirke bildekvaliteten hvis de er i interesseområdet til MR-undersøkelsen. SAM Pelvic Sling II må ikke flyttes eller fjernes fra pasienten i nærheten av et kraftig magnetfelt, slik som det som er forbundet med et MR-system.

## KLINISK INFORMASJON FOR BRUKERE:

For å bruke dette produktet på en trygg måte er det nødvendig å gjøre seg kjent med og få opplæring i bruk av SAM Pelvic Sling II og bruksanvisningen i tillegg til å følge helseorganisasjonens evidensbaserte behandlingsstandarder og kliniske retningslinjer, inkludert bruk av personlig verneutstyr. Hvis enheten ikke brukes i tråd med bruksanvisningen, opplæring og kliniske retningslinjer for best praksis, kan det føre til alvorlig sykdom eller skade.

## SYMBOLFORKLARING:

|                                   |     |   |  |
|-----------------------------------|-----|---|--|
| Produsent                         |     | Skal ikke brukes på nytt  |  |
| Partikode                         | LOT | CE-merking  |  |
| MR-sikker under visse betingelser |     | Autorisert representant i EU  |  |
| Forsiktig                         |     | Se bruksanvisningen. Elektronisk bruksanvisning tilgjengelig på: <a href="http://sammedical.com/eIFU">sammedical.com/eIFU</a> |  |
| Katalognummer                     | REF | Importør  |  |
| Medisinsk utstyr                  | MD  | Unik enhetsidentifikator  |  |
| Liten, standard, stor             |     |   |  |

©2023 SAM Medical Products<sup>®</sup> Med enerett.