


Instruksjoner for bruk


Instruksjoner for å trekke

1

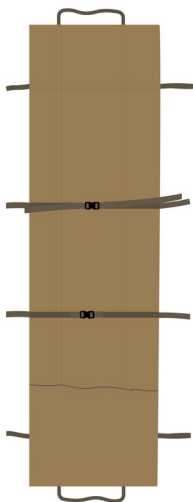


Åpne opp Retmex.

2

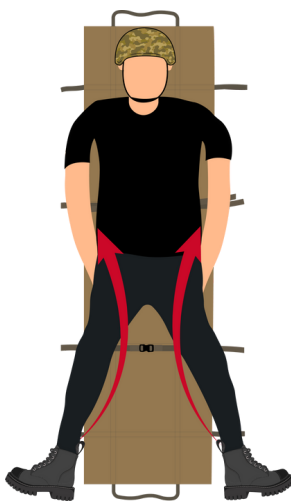


Trekk fottelen mellom pasientens ben. Sørg for at den sitter som en 'bleie'.

3

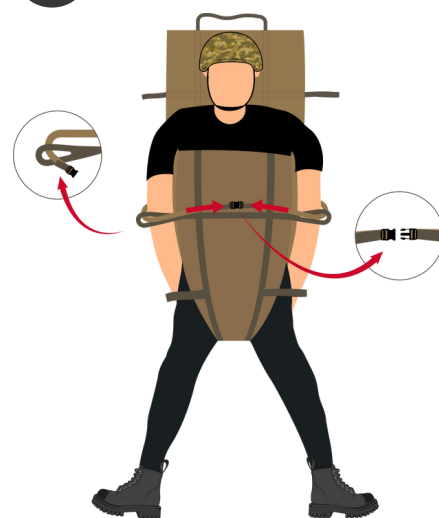

For å fikse pasienten inne i Retmex, dra fikseringsstroppene gjennom håndtakene og lukk fikseringsstroppene.

4

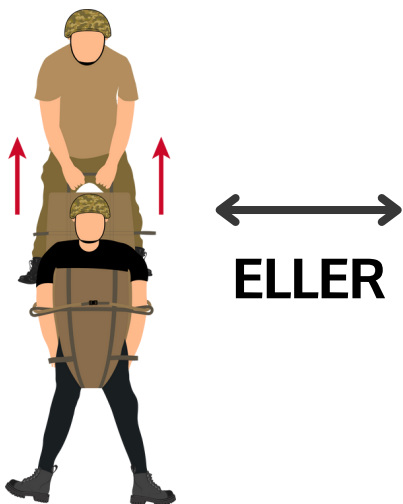

Bruk nå håndtaket til å dra pasienten i sikkerhet.

ELLER



Betjener du Retmex med to personer, kan du bruke håndtakene på de langsgående sidene for å dra.



TIPS

Sørg for at armene er plassert under fikseringsstroppene.



ADVARSEL

Friksjon på grunn av sleping, skarpe kanter eller fremspring kan skade Retmex og derfor redusere effektiviteten til produktet.

Instruksjoner for løft

- Plasser pasienten i midten av redningsseilet. Om nødvendig kan du bruke logroll-teknikken til å plassere redningsseilet under pasienten.
- Når du betjener redningsseilet med to personer, skal én person stå ved fotenden og én person stå ved hodeenden. Sørg for å holde ryggen i rett stilling for å unngå skader. Løft ved hjelp av knærne.
- I en ideell situasjon, bruk redningsseilet med minst 3 eller 4 brukere. Bruk håndtakene på de langsgående sidene av redningsseilet for å løfte opp pasienten og forflytte til sikker sone.



ADVARSEL

Vær forsiktig når du løfter. Sørg for at du forstår de riktige manuelle håndteringsteknikkene. Å løfte tunge gjenstander kan føre til alvorlige skader.

