

## BRUKSANVISING

### Innledning og tiltenkt bruk

FLEXISLIDE™ Utstyr for sideveis flytting av pasienter er et laken til engangsbruk som er utformet for overføring av en pasient mellom to overflater i en pre / peri-operativ situasjon eller ER-omgivelser.

### Indikasjoner for bruk

FLEXISLIDE™ skal bare brukes av trent helsepersonell. Det er ingen begrensninger når det gjelder bestemte pasientgrupper hverken når det gjelder fysisk tilstand, funksjonshemming eller alder.

### Konfigurasjoner

#### FLEXISLIDE™ Utstyr for sideveis flytting av pasienter

DELENUMMER	BESKRIVELSE	ENHETER PR. ESKE
MW1029	FLEXISLIDE™ Standard laken, til engangsbruk, for flytting av pasienter 102228	50
MW1061	FLEXISLIDE™ Ekstra bredt laken, til engangsbruk, for flytting av pasienter 102229	50
105093	FLEXISLIDE™ Ministørrelse/ekstra bredt laken, til engangsbruk, for flytting av pasienter	50
105089	FLEXISLIDE™ Ministørrelse laken, til engangsbruk, for flytting av pasienter	50

### Teknisk spesifikasjon

#### Mål: FLEXISLIDE™ Utstyr for sideveis flytting av pasienter

DELENUMMER	LENGDE	BREDDE
MW1029	195cm	85cm
MW1061	195cm	115cm
105093	120cm	115cm
105089	120cm	85cm

### Advarsler og forholdsregler



- **IKKE** forsøk å løfte pasienten ved bruk av FLEXISLIDE™. FLEXISLIDE™ er bare ment brukt til å overføre en pasient fra en flate til en annen.
- FLEXISLIDE™ kan tåle en vekt på 400 kg ved sideveis overføring når det brukes en kombinert skyv- og trekkteknikk. FLEXISLIDE™ egnert seg ikke til pasienter som veier mer enn 400 kg.
- Se alltid til at det tilstrekkelig antall personer tilgjengelig før pasienten overføres med FLEXISLIDE™.
- På grunn av risikoene ved den komplekse overføringen og håndteringen må det foretas en totalvurdering av en person med egnede kvalifikasjoner før overføringslakenet brukes.
- Vurderingen må ta i betraktning brukerne, pasienten, oppgaven og omgivelsene overføringslakenet skal brukes i.
- Det anbefales at hver pasient risikovurderes etter Waterlow score eller i henhold til sykehusets "retningslinjer om flytting og håndtering av pasienter".
- Det er en risiko hvis operasjonsbordet heller mer enn normalt ved en standard Trendelenburg- og omvendt Trendelenburgposisjonering.
- Skulle operasjonsbordet kreve større helling anbefales det å sikre at det brukes ekstra klemmer til operasjonsbordet for å sikre pasientens sikkerhet.
- Hvis du oppdager at det har skjedd noen alvorlige hendelser i forbindelse med FLEXISLIDE™, må denne hendelsen rapporteres til Cantel, som er produktets produsent og rapporteringsmyndigheten til medlemslandet der brukeren/pasienten befinner seg.

## Sympolene forklart



Produsent.



Seriekode.



Katalognummer.



Flere gangers bruk til én enkelt pasient.



CE-merke.



Autorisert representant i EU.



Se i bruksanvisningen.



Medisinsk utstyr.



Merknad om forholdsregler.



Må ikke brukes hvis pakken er skadet.

## FLEXISLIDE™ Bruksanvisning

1. Sikre at bærengens/bærens bremses er på.
2. Benytt alltid en broanordning mellom de 2 overflatene når pasienter overføres.
3. Plasser FLEXISLIDE™ på bæreng og sikre at den blanke/faldete siden (med produktmerket) er vendt mot bærens overflate.
4. Plasser alltid pasientens pute oppå FLEXISLIDE™ og under pasientens hode.
5. Sikre at FLEXISLIDE™ ligger så flatt som mulig under pasientens hode og føtter.
6. For å overføre pasienten, bruk det håndhullet som passer best for din høyde og størrelse.
7. Ved overføring av pasienten må det alltid brukes en kombinasjon av skyv- og trekkteknikk, som anbefalt i sykehusets retningslinjer.
8. For å plassere FLEXISLIDE™ under en immobil pasient er FLEXISLIDE™ brettet på en slik måte at den hjelper til i denne prosessen.
9. Så snart pasienten er tilbake i sengen, fjern FLEXISLIDE™ ved bruk av vanlig teknikk for fjerning av overføringslaken.
10. Så snart FLEXISLIDE™ er fjernet fra pasienten, kastes det som klinisk avfall. FLEXISLIDE™ er bare til engangsbruk for å forhindre risikoen for krysskontaminering. FLEXISLIDE™ må ikke vaskes for gjenbruk.

Det er viktig at væsker ikke samler seg på overflaten av FLEXISLIDE™ eller under pasienten. I tilfelle det har samlet seg væske, tørk den opp.

For å forhindre risikoen for krysskontaminering er FLEXISLIDE™ bare til engangsbruk, må ikke vaskes for gjenbruk og må kastes som klinisk avfall.

## Kontaktopplysninger

For bestilling eller ytterligere informasjon, ta kontakt med oss via følgende kontaktopplysninger:



### Cantel (UK) Ltd

Campfield Road, Shoeburyness, Essex SS3 9BX UK.

**Telefon:** +44 (0)1702 291878

**Faks:** +44 (0)1702 290013

**E-post:** [info@cantelmedical.co.uk](mailto:info@cantelmedical.co.uk)

**Internett:** [www.cantelmedical.co.uk](http://www.cantelmedical.co.uk)

### Cantel France SAS

3 Rue Du Pre Ferme, 31200 Toulouse, France.

**Telefon:** +335 61 245 275

**Faks:** +335 61 247 001

**E-post:** [info@cantelmedical.fr](mailto:info@cantelmedical.fr)

**Internett:** [www.cantelmedical.eu/fr](http://www.cantelmedical.eu/fr)

### Medivators BV

Amerikalaan 110, 6199 AE Maastricht, The Netherlands.

**Telefon:** +31 (0)45 5471471

**Faks:** +31 (0)45 5429695

**E-post:** [CSNL@medivators.com](mailto:CSNL@medivators.com)

**Internett:** [www.cantelmedical.eu/nl](http://www.cantelmedical.eu/nl)



### Cantel Medical (Italy) S.r.l.

Via Laurentina, 169, 00071 Pomezia (RM), Italia.

**Telefon:** +39 06 9145 399

**Faks:** +39 06 9146 099

**E-post:** [info@cantelmedical.it](mailto:info@cantelmedical.it)

**Internett:** [www.cantelmedical.eu/it](http://www.cantelmedical.eu/it)

### Cantel (Germany) GmbH

Messerschmittstr. 11, 86368 Gersthofen, Tyskland.

**Telefon:** +49 211 9098 0750

**Faks:** +49 211 9098 0752

**E-post:** [CSDE@cantelmedical.de](mailto:CSDE@cantelmedical.de)

**Internett:** [www.cantelmedical.eu/de](http://www.cantelmedical.eu/de)

700153 utgave 5 04/2021

© 2021 Alle rettigheter forbeholdes. Denne publikasjonen er beskyttet av åndsverkløven. Kopiering, visning til andre eller bruk av denne publikasjonen er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Cantel (UK). Cantel (UK) forbeholder seg retten til endre spesifikasjonene som er beskrevet her uten noen forpliktelser om forvarsel om dette. For flere opplysninger, ta kontakt med Cantels representant.

FLEXISLIDE™ er et varemerke for Cantel (UK) Ltd.