



Dr. Marx Amputerad påse

För säker förvaring och transport av traumatiskt amputerade kroppsdelar

Storlek 1 handenligt (30 x 25 cm), 2 armenligt (70 x 25 cm),
3 benenligt (110 x 40 cm)

Användningsinstruktioner

1. Slå inamputerad kroppsdel i ett sterilt förband.
2. Öppna påsen med dubbla väggar. Den inre och yttre påsen är sammanbundna säkert vid basen.
3. Placera den amputerade kroppsdel i **innerpåsen** och dra sedan i de två **röda trådarna** för att stängas ordentligt.
4. Fyll **yttrepåsen** till en nivå ovanför den amputerade delen med lika delar vatten och is. Dra sedan i de två **gröna trådarna** för att stänga den ordentligt. Som ett alternativ kan kalla kompresser också användas för kylning.
5. Häng upp påsen med stöd (från både inner- och ytterväska). Om väskan är mycket full och tung, ge du ge ytterligare stöd åt sidorna och basen.
6. För transporter som är långväga, var noga med att fylla på med ny is eller kalla kompresser.

REF 2204 56 / REF 2204 57 / REF 2204 58

LOT /  se etikett



STERILE R 
Medizinprodukt

 MADE
 IN
 GERMANY

 WERO GmbH & Co. KG · D-65232 Taunusstein · www.wero.de