



WERO

Dr. Marx Replantaattipussi **Amputoitujen ruumiinosien turvalliseen kuljetukseen ja säilytykseen.**

Koko 1 käsi (30 x 25 cm), 2 käsivarsi (70 x 25 cm), 3 jalka (110 x 40 cm)

Käyttöohjeet

- 1.** Kääri amputoitu ruumiinosa steriiliin nesteeseen.
- 2.** Avaa tuotepaketti. Poista kaksiseinäinen pussi ja taittele tasaiseksi. Sisä- ja ulkopussit ovat pohjasta liimattuja yhteen.
- 3.** Aseta amputoitu ruumiinosa sisäpussiin ja sulje sitten tiukasti vetämällä kahta punaista nauhaa.
- 4.** Täytä ulkopussi amputoidun ruumiinosan yläpuolelle yhtä suurilla määrillä vettä ja jäätä. Sulje pussi sitten vetämällä kunnolla kahdesta vihreästä nauhasta. Vaihtoehtoisesti jäähdytykseen voidaan käyttää myös pikakylmäpakkauksia .
- 5.** Kannattele kaksiseinäistä pussia naruista (sekä sisä-, että ulkopussista). Jos pussi on hyvin täynnä ja painava, anna lisätukea sivuille ja pohjalle.
- 6.** Pitkissä kuljetuksissa muista lisätä tuoretta jäätä tai kylmäpakkauksia

REF 2204 56 / REF 2204 57 / REF 2204 58

LOT /  katso etiketti



STERILE R 
Medizinprodukt

**MADE
IN
GERMANY**

 **WERO** GmbH & Co. KG · D-65232 Taunusstein · www.wero.de