



Dr. Marx Replantaattipussi L Amputoitujen ruumiinosien turvalliseen kuljetukseen ja säilytykseen.

Koko 3 jalka, per DIN EN 1789

Sisällys

En steril påse med dubbla väggar (110 x 40 cm), för användning som behållare för ett amputerat ben (t.ex.)

Käyttöohjeet

1. Kääri amputoitu ruumiinosa steriiliin nesteeseen.
2. Avaa tuotepaketti. Poista kaksiseinäinen pussi ja taittele tasaiseksi. Sisä- ja ulkopussit ovat pohjasta liimattuja yhteen.
3. Aseta amputoitu ruumiinosa sisäpussiin ja sulje sitten tiukasti vetämällä kahta punaista nauhaa
4. Täytä ulkopussi amputoidun ruumiinosan yläpuolelle yhtä suurilla määrillä vettä ja jäätä. Sulje pussi sitten vetämällä kunnolla kahdesta vihreästä nauhasta. Vaihtoehtoisesti jäähdytykseen voidaan käyttää myös pikakylmäpakkauksia.
5. Kannattele kaksiseinäistä pussia naruista (sekä sisä-, että ulkopussista). Jos pussi on hyvin täynnä ja painava, anna lisätukea sivuille ja pohjalle
6. Pitkissä kuljetuksissa muista lisätä tuoretta jäätä tai kylmäpakkauksia

REF 220458

LOT / see label



STERILE R

MD
Medizinprodukt

MADE
IN
GERMANY

