



Dr. Marx Amputerad påse L Försäker förvaring och transport av traumatiskt amputerade kroppsdelar

Storlek 3 benenligt DIN EN 1789

Innehåll

En steril påse med dubbla väggar (110 x 40 cm), för användning som behållare för ett amputerat ben (t.ex.)

Användningsinstruktioner

1. Slå in amputerad kroppsdel i ett sterilt förband.
2. Öppna påsen med dubbla väggar. Den inre och yttre påsen är sammanbundna säkert vid basen.
3. Placera den amputerade kroppsdelens i innerpåsen och dra sedan i de två röda trådarna för att stängas ordentligt.
4. Fyll ytterpåsen till en nivå ovanför den amputerade delen med lika delar vatten och is. Dra sedan i de två gröna trådarna för att stänga den ordentligt. Som ett alternativ kan kalla kompresser också användas för kylning.
5. Häng upp påsen med stöd (från både inner- och ytterväska). Om väskan är mycket full och tung, ge ytterligare stöd åt sidorna och basen.
6. För transporter som är långväga, var noga med att fylla på med ny is eller kalla kompresser.

REF 220458

LOT / see label



STERILE R MD
Medizinprodukt

MADE
IN
GERMANY

