

Bruksanvisning



Model 59-T EZ Glide™ Bärstol

Ansvarsfrihet

Denna bruksanvisning innehåller allmänna instruktioner för handhavande, funktion och vård av denna stol. Instruktionerna är inte heltäckande. Säkerhet och korrekt handhavande av denna stol är helt upp till användaren. Däremot är säkerhetsföreskrifter inkluderade, som en hjälp för användaren. Alla andra säkerhetsåtgärder, som användaren vidtar borde beakta gällande föreskrifter. Vi rekommenderar att man får utbildning för att uppnå ett korrekt handhavande, innan man använder produkten i en verklig befintlig situation.

Behåll denna bruksanvisning för framtida referens. Den skall bifogas med produkten då en ny person använder den. Extra gratis kopior är tillgängliga från KUNDKONTAKT.

Äganderätt

Den givna informationen i denna bruksanvisning tillhör Ferno-Washington Inc., Wilmington Ohio, USA. Ferno-Washington, Inc. förbehåller sig alla rättigheter till patent, design, tillverkning, kopiering och försäljning, och till varje vara under dessa kategorier, undantaget då rättigheterna är uttryckligen förbehållna andra eller då de inte är tillämpliga på delar av försäljningsprodukter.

Upphovsrätt Ferno-Washington, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ytterligare Instruktionsmaterial tillgängligt för

EZ Glide Bärstol

EZ Glid Utbildning CD 283-1214

© Copyright Ferno-Washington, Inc. All Rights Reserved.

Ferno Norden AB
Kardanvägen 37
SE-46 138 TROLLHÄTTAN, SVERIGE

Telefon..... +46 (0)520 - 420 200
Email fab@fernonorden.com
Internet www.fernonorden.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sektion	Sida	Section	page
1 - Säkerhetsinformation	5-7	6.5 Glida stolen nedför trapporna - Kun modell 59-T	18, 19
1.1 Varningar	5	6.6 Hur man transporterar patienten nedför trappan - kun modell 59	20
1.2 Viktigt	5	6.7 Hur man transporterar patienten uppför trappan Kun modell 59-T og 59	21
1.3 Blodsmitta	5	6.8 Använd ytterligare hjälp.....	22
1.4 Säkerhets- och instruktionsmärken	5-7	7 - Underhåll.....	23-30
2 - Färdigheter och utbildning.....	7	7.1 Underhållsskjema	23
2.1 Färdigheter.....	7	7.2 Desinfektion/Tvätt av bälten	23
2.2 Utbildning	7	7.3 Desinfektion/Tvätt av stolen.....	23
3 - Om stolen.....	8, 9	7.4 Tvätt av larvfötter och dess bälten	23
3.1 Beskrivning av stolen	8	7.5 Inspektera stolen	24
3.2 Allmänna mått	8	7.6 Smörjning av stolen.....	25
3.3 Komponenter.....	9	7.7 Smörj inte larvfötterna på Model 59-T.....	25
4 - Montering av stolen	10, 11	7.8 Justering av sträckningen i bältet hos larvfötterna	26, 27
4.1 Bälteskonfigurationer för stol med ABS plattor	10	7.9 Reparation av bälten hos larvfötter	28
4.2 Användande av endelsbälten	10	7.10 Ta bort eller fästa ABS plattor.....	29
4.3 Fotbälten	11	7.11 Att avlägsna och fästa det mjuka vinyl- överdraget.....	30
4.4 Hur man fäster bälten på stol med mjuk vinylöverdrag.....	11	8 - Accessoarier och relaterade produkter	31
5 - Använd tekniken	12-15	8.1 Accessoarier	31
5.1 Låsmekanism	12	8.2 Bälten	31
5.2 Larvfötter, kun modell 59-T	13	9 - Reservdelar och Service.....	32, 33
5.3 Hur man justerar lyfthandtaget.....	14	9.1 Reservdelar - U.S.A. ch Kanada.....	32
5.4 Teleskoperande lyfthandtag.....	14	9.2 Reservelar - överallt i världen	32
5.5 Fotstötte.....	15	9.3 Reservdelslista	32
5.6 Hjulås	15	9.4 Reservdelstablå	33
6 - Hur man använder stolen.....	16-22	10 - Begränsad garantitid.....	34
6.1 Innan man tar stolen i bruk.....	16	11 - Ferno Norden kundtjänst.....	34
6.2 Allmänna riktlinjer för användande	16	Träningslista	35
6.3 Transferring the Patient	17		
6.4 Förflyttning av pasient.....	17		

1 - SÄKERHETSINFORMATION

1.1 Varningar

Varningsmeddelanden indikerar en eventuellt farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna leda till skada.

VARNING

Utbildade bärare kan vålla skada eller bli skadade. Tillåt endast utbildad personal att manövrera stolen.

Felaktig användning av stolen kan vålla skada. Använd stolen bara i syftet som beskrivs i manualen.

Om man fäster endelsbälten felaktigt, kan det rubba sitt- och ryggplatta, vilket kan resultera i en skada. Bälten måste kunna fånga upp plattor OCH stolskelett.

Om man använder stolen med olåsta larvfötter, kan det vålla skada. Se till att larvfötterna är låsta, innan man transporterar patienten.

Om man smörjer larvfötterna, kan patienten och/eller bärarna skadas. Smörj aldrig larvfötter eller dess bälten.

Felaktigt handhavande kan vålla skada. Handha endast stolen enligt beskrivningen i manualen.

En patient som inte är under uppsikt kan skadas. Lämna inte patienten.

En icke-fixerad patient kan falla ur stolen och skadas. Använd bälten för att trygga patienten i stolen.

Medhjälpare kan vålla skada eller skadas. Håll kontroll över stolen, använd spakarna/ handtagen och dirigera alla medhjälpare.

Improper maintenance can cause injury. Maintain the chair only as described in this manual.

VARNING

Om man fäster felaktiga saker på stolen kan det vålla skada. Använd bara varor som är godkända av Ferno på stolen.

Om man modifierar stolen kan det vålla kroppsskada och stolskada. Använd bara stolen på det sätt som den är avsedd för.

1.2 Viktigt

Texten "Viktigt" betonar viktig information om användning eller underhåll.

Viktigt

Stollåset måste låsas innan man vecklar ut/ihop stolen. Drag alltså stängen för låsmekanism framåt. Sedan börjar du att veckla ut/ihop stolen.

1.3 Blodsmitta

För att minska risken för att bli smittad av blodsmitta, som HIV-1 och hepatit när du använder stolen, följ desinfektions- och tvättinstruktioner i denna bruksanvisning.

1.4 Säkerhets- och instruktionsmärken

Säkerhets- och instruktionsmärken fastsatta på stolen innehåller viktig information från användarmanualen.

Läs och följ instruktionerna. Ersätt uttjänta eller skadade märken genast. Nya märken kan erhållas från EMSAR (sid 32) eller från Ferno Kundtjänst (sid 34)



Bilder på märken på sidorna 6 och 7 är fastsatta på stolarna.

Säkerhets- och instruktionsmärken (fortsättning)

MODEL 59-T BÄRSTOLSMÄRKEN

Model 59-T EZ Glide Evacuation Chair


- Minimum of two trained operators required
- Use only as described in users' manual
- Free users' manuals: 1-800-733-3766 or www.ferno.com

238-1425-00-A

Märke A

Grundläggande riktlinjer för säkerhet och maxlast

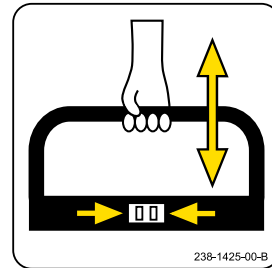

Märke B

Instruktion för justerbart lyfthandtag

Pull then Fold/Unfold Chair

238-1425-00-C

Märke C- Instruktion för hur man vecklar ihop/ut stolen

Do Not Lubricate





238-1425-00-D

Märke D
Säkerhetsinstruktion:
Smörj INTE larvfötterna

Label F
Instruktion för
att fälla ihop
larvfötterna


Pull to Open

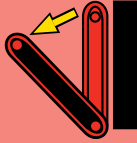

238-1425-00-E

Märke E - Instruktion för att fälla ut larvfötterna

Push to Close

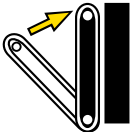


238-1425-00-F

WARNING


Attaching restraints improperly can allow seat and back panels to dislodge, resulting in injury. Restraints must capture panel AND chair frame as shown.

Free users' manuals: 1.800.733.3766 or www.ferno.com

One-Piece Restraint



Two-Piece Restraint

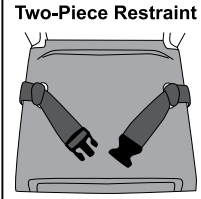

238-1440-00


Label 234-1440-00
Säkerhetsinstruktion:
Hur man fäster en- och tvådelsbälten.

Säkerhets- och instruktionsmärken (fortsättning)

MODEL 59 EVACUATION CHAIR LABELS

Model 59 EZ Glide Evacuation Chair


- Minimum of two trained operators required
- Use only as described in users' manual
- Free users' manuals: 1-800-733-3766 or www.ferno.com



238-1425-00-J

Label J

Grundläggande riktlinjer för säkerhet och maxlast.

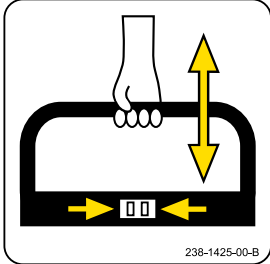

238-1425-00-B

Label B

Instruktion för justerbart lyfthandtag

Pull then Fold/Unfold Chair


238-1425-00-C

WARNING


Attaching restraints improperly can allow seat and back panels to dislodge, resulting in injury. Restraints must capture panel AND chair frame as shown.

Free users' manuals: 1.800.733.3766 or www.ferno.com

One-Piece Restraint



Two-Piece Restraint

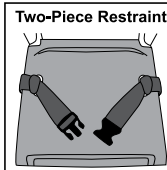

Label 234-1440-00

Säkerhetsinstruktion:
Hur man fäster en- och tvådelsbälten

238-1440-00

2 - FÄRDIGHETER OCH UTBILDNING

2.1 Färdigheter

Personal som använder stolen behöver:

- bemästra olika handhavanden av patienten i nödsituationer
- kunna ta hand om patienten
- ha en fullständig förståelse för metoderna i manualen.

2.2 Utbildning

Personalen behöver:

- följa ett lämpligt utbildningsprogram, skrädarsytt av deras chef
- läsa denne manual. För ytterligare gratis manualer kontakte din Ferno Norden kontakt (sidan 34).

! VARNING

Utbildade bärare kan vålla skada eller bli skadade. Tillåt endast utbildad personal att manövrera stolen.

- öva med stolen innan de använder den i verksamheten.
- testa sina kunskaper om bären
- bokföra deres utbildningsinformation. Ett exempel på hur en sådan bokföring kan se ut, se sidan 35.

3 - ABOUT THE CHAIR

3.1 Beskrivning av stolen

Modellen 59-T och Modell 59 EZ TM Bärstol (kallad stolen i denna manual) är ett redskap för patienthantering vid olycksfall, avsett för att transportera en sittande patient upp och ner för trappor och över flata ytor.

Stolen skall användas professionellt med minst två utbildade bärare. Ytterligare hjälp kan behövas, när man arbetar med tunga patienter.

Modellen 59-T är designad med larvfötter, som gör att bärarna låter stolen glida nedför trappan istället för att dom bär stolen. Dock saknar Modell 59 larvfötter och måste bäras.

Beskrivning:

- Larvfötter (Endast Modell 59-T)
- Val av gjuten ABS sitt- och ryggplatta eller mjuk vinylklädnad
- Justerbart lyfthandtag i 5 steg på baksidan av stolen.
- Teleskoperande handtag på framsidan.
- 6" hjullås på bakhjulen
- 4" främre svänghjul
- Fotbälte

Valbara accessoarer:

- Lyfthandtag där bak, med eller utan låsmöjligheter.
- IV infusionshållare
- O2 flaskhållare
- Nackstöd (med rem)
- Restraint System (bälten)
- Upphängningsanordning med "sprint" lås för att fixera stolen i ambulans eller station
- Hake (med krok) för att fixera stolen på station.

! VARNING

**Improper use of the chair can cause injury.
Use the chair only for the purpose described
in this manual.**

3.2 Almenna mått

Høyde	
Maximum	161 cm
Minimum	95 cm
Vidd	
Totalt	51.6 cm
Säte	42cm
Djup (från framsidan till baksidan Model 59-T)	
Larvfötterna infällda, handtagen intryckta....	73 cm
Larvfötterna utfällda, handtagen utdragna.	130 cm
Djup (från framsidan till baksidan Model 59)	
Handtagen intryckta	69 cm
Handtagen utdragna	102 cm
Hopfälld (Model 59-T)	
.....	95 cm x 51.6 cm x 20 cm
Hopfälld (Model 59)	
.....	95 cm x 51.6 cm x 18 cm
Vikt*	15 kg

* utan bälten eller accessoarer

Några mått är avrundade till närmaste heltal. Enhetsbyten beräknas först innan man avrundar. För mer information, kontakta Ferno Kundtjänst (sid 34)

Ferno förbehåller sig rätten att ändra mått utan varsel.



3.3 Komponenter


Komponenterna är de samma förutom de delar märkta "Endast 59-T."



BÄLTESALTERNATIV



ANVÄNDARMANUAL

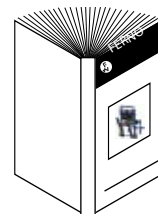

För att begära ytterligare gratis användarmanualer, kontakta Ferno Kundtjänst (sid 34).

4 - MONTERING AV STOL

4.1 Bälteskonfigurationer för stol med 4 ABS plattor

HORISONTELL KONFIGURATION

Använd ett bälte för bröstet och ett bälte för knäna (figur 1).

1. Fäst bröstbälten genom matchande horisontella eller vertikala hål på ryggplattan.
2. Fäst knäbälten genom hålen på sittplattan.

KORSKONFIGURATION

Använd två bälten för bålen. Ferno rekommenderar att du använder ett tredje bälte för knäet (figur 2).

1. Fäst ett av bältena genom ett vertikalt hål i stolens ryggpanel.
2. Fäst det andra bältet genom hålet i sittplattan på motstående sida av stolen.
3. Upprepa detta förfarande med det andra bältet.
4. Fäst slutligen knäbältet genom hålen i sittplattan.

4.2 Användande av endelsbälten

Ferno rekommenderar att du använder tvådelsbälten till rygg- och sittplattorna, men om du väljer att använda endelsbälten, så måste dom fånga upp plattorna och stolskelettet enligt :

1. Arbeta från patientsidan av plattan och mata bältesändarna genom hålen på de motsatta sidorna av plattan.
2. Vira bältet runt stolen för att fånga upp plattan och stolskelettet.
3. Spänn bälte (figur 3) och justera längden,



Figur 1 - Horisontell bälteskonfiguration



Figur 2 - Korskonfiguration med knäbälte

! VARNING

Om man fäster endelsbälten felaktigt, kan det rubba sitt- och ryggplatta, vilket kan resultera i en skada. Bälten måste kunna fånga upp plattor OCH stolskelett.




**Figur 3 - Topp: Korrekt virat bälte
Insats: Fäst bälte**

4.3 Fotbälten

Fäst tvådels- fotbälte på de främre stolsbenen.

För att fästa:

1. Spänn upp hållbältet som separerar bältena.
2. Vira ett bälte runt ena främre stolsbenet och träd spännet genom öglan (figur 4).
3. Drag i bältet tills öglan är spänd (figur 5).
4. Fäst återstående delen på andra främre stolsbenet.
5. Buckle the restraint and adjust the length (Figur 6).

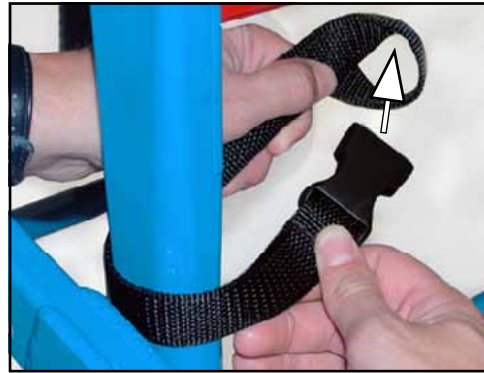

Figur 4 - Så här trär du spännet genom öglan



Figur 5 - Spänn bältet

4.4 Hur man fäster bälten på stol med mjukt vinylöverdrag

Med mjukt vinylöverdrag, använd korskonfiguration och ett knäbälte (figur 2, sid 10).

Fäst bältena så här:

1. Spänn upp hållbältet för att separera bältena.
2. Fäst bältet med "honan" till vänster eller höger sida av ryggstödet (figur 7). Följ instruktionerna i användarmanualen för bälten, när du fäster ett två-dels bälte.
3. Fäst bältet med "hanen" på den oskyddade ytan av sittplattan på motstående sidan av stolen.
4. Upprepa steg 1-3 för det andra bälte.
5. Fäst ett knäbälte längs de redan fästade bältena på sittplattan.
6. Spänn och justera bältena slutligen.



Figur 6 - Fotbälte fäst



Figur 7 - Bålbälten på stol med mjukt vinylöverdrag

5 - ANVÄND TEKNIKEN

5.1 LÅSMEKANISM

Den röda låsmekanismen under den främre kanten av sätet låser upp låset för att veckla ut/ihop stolen. Innan patienten sätter sig, kontrollera att stolen är helt utvecklad och låst.

HUR MAN VECKLAR IHOP STOLEN

1. Spänn bältena och justera dom, så att de inte krånglar när du vecklar ihop stolen.
2. Rulla stolen baklänges en smula för att vända på svänghjulen.(figur 8)
3. Stå på stolssidan och fatta ryggstödet med ena handen och låsmekanismen med den andra.
4. Drag låsmekanismen framåt och börja sedan vika sätet mot ryggstödet.

När du viker sätet, luta stolen framåt lite grann, så att de främre hjulen pekar utåt. Det kommer att hindra låset från att låsa sig.

5. Pressa sätet mot ryggstödet tills stolen låser sig(figur 11)
6. Kontrollera att stolen är låst genom att dra sätet bort från ryggstödet utan att dra i låsmekanismen. Sätet kommer inte att röra sig, om stolen är låst.


HUR MAN VECKLAR UT STOLEN

1. Stå bredvid stolen och fatta ryggstödet med den ena handen och låsmekanismen med den andra.
2. Drag låsmekanismen framåt. Sedan skjuter du sätet bort från ryggstödet, tills det är helt utvecklat och låset går i lås.
3. Kontrollera att stolen är låst, genom att fixera ryggstödet alltmedan du drar i stolen på framsidan, utan att du fördenskull drar i låsmekanismen. Stolen kommer inte att vecklas ihop, om den är låst.



Figur 8 - Rätta ut hjulen

Figur 9 - Lås upp stolen

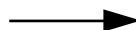

Figur 10 - Vik ihop stolen



Figur 11 - Lås stolen



Viktigt

Stolen måste låsas innan man vecklar ut/ihop stolen. Drag låsmekanismen framåt. Sedan börjar du att veckla ut/ihop stolen.

5.2 Larvfötter

EZ Glide larvfötter systemet möjliggör för bärare att glida stolen nedför trappor istället för att de bär eller lyfter den.

RIKTLINJER FÖR LARVFÖTTER

- När man använder stolen i trappor, behövs minst två utbildade bärare.
- Kontrollera att larvfötterna är helt öppnade och låsta, innan du använder dem.
- Smörj aldrig larvfötternas bälten. Smorda larvfotsbälten kan agera på ett oförutsett sätt, vilket kan resultera i kroppsskada för patient och bärare.
- Fukt, vatten, snö, is eller bråte på eller mellan larvfötter och bälten kan framkalla oregelbundet beteende. Det kan resultera i plötsliga viktändringar som bärare måste hantera. Se till att larvfötter och bälten är rena och torra innan du använder stolen.
- Vatten, snö, is eller bråte på trapporna kan ge dåligt fotfäste för bärare. För att undvika eventuell kroppsskada, röj i trappan eller ta en annan väg.

HUR DU VECKLAR UT LARVFÖTTERNA

1. Fatta låset beläget nära toppen av larvfötterna (figur 12) och drag det kraftigt tillbaka tills larvfötterna låses i fullt utvecklat läge
2. Kontrollera att larvfötterna är låsta genom att du försöker trycka på larvfötterna. Om dom är låsta, kommer inte larvfötterna att röra sig.

HUR DU VECKLAR IHOP LARVFÖTTER

Tryck ned med din ena hand den röda låsmekanismen (figur 13) tills larvfötterna har vecklats ihop.



Figur 12 - Hur du vecklar ut larvfötterna



Figur 13 - Hur du vecklar ihop larvfötterna

! VARNING

Om du använder stolen med olåsta larvfötter kan det vålla skada. Kontrollera att fötterna är låsta, om du skall transportera patienten.

! VARNING

Om man smörjer larvfötterna kan det skada patienten eller/och bärarna. Smörj aldrig larvfötterna eller deras bälten.

5.3 Hur man justerar lyfthandtaget

Ta tag i lyfthandtaget för att röra och leda stolen, när du låter den glida ned för trapporna, bär den upp för trapporna /hindren, och rullar den.

Det justerbara lyfthandtaget kan låsas i fem lägen(figur 14, vänster). Justera höjden enligt bärarens önskemål eller den befintliga situationen.

DRA UT ELLER SKJUT IHOP LYFTHANDTAGET

1. Krama med ena handen ihop låsflikarna och med den andra fatta lyfthandtaget och höj eller sänk det. (Figur 14)
2. Kontrollera att lyfthandtaget är låst, genom att försöka höja eller sänka det utan att fördenskull krama låsflikarna.




Figur 14 -
Vänster: Lägen för justerbart lyfthandtag
Insatt: Justering av höjden

5.4 Teleskoperande lyfthandtag

De teleskoperande lyfthandtagen kan justeras och låsas i fem lägen(figur 15, Höger). Justera handtagen enligt bärarens önskemål eller uppgiften.

DRA UT OCH SKJUT IN LYFTHANDTAGEN

1. Tryck på utlösningknappen (Figur 15) och tryck eller drag handtaget tills det är nära den önskade positionen.
2. Släpp knappen och skjut handtaget lite framåt eller bakåt tills den låses i position.
3. Kontrollera att båda handtagen är låsta, genom att trycka eller dra dom, utan att fördenskull trycka på utlösningknapparna. När handtagen är låsta, kan dom inte röra sig.

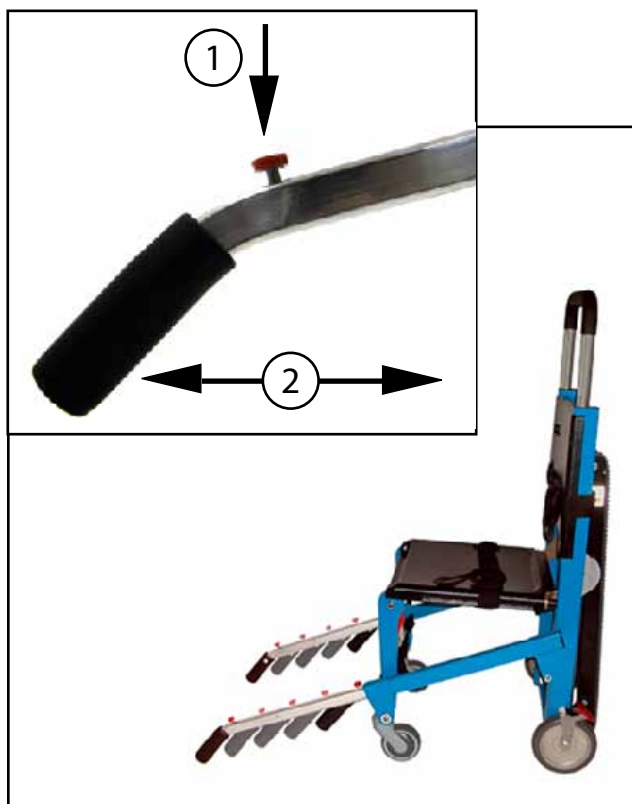

Figur 15
Höger : Lägen för teleskoperande handtag
Insatt: Dra ut/Skjut in ett handtag

5.5 Fotstöd

Fotstödet har två lägen: höjt för vila,(figur 16) och sänkt för användning.(figur 17).

För att sänka fotstödet, sväng ned det tills det stoppar.

För att höja fotstödet, sväng upp det tills det stoppar.

RIKTLINJER FÖR HUR DU ANVÄNDER FOTSTÖDET

Använd fotstödet riktigt, så att du inte riskerar patienters eller bärares fötter.

- Innan du för över patienten i stolen, se till att fotstödet är i viloläge.
- När du för patienten ur stolen, spänn upp fotbältet och höj fotstödet till viloläge innan du lösgör bältena över bål och knä. Förfarandet kommer att hindra att patienten står upp, innan du har placerat fotstödet i viloläge.
- Håll fotstödet höjt, när det inte används.



Figur 16 - Fotstöd i viloläge



Figur 17 - Fotstöd i användarläge

Viktigt

Höj fotstödet i viloläge innan du överför patienten till/från stolen.

5.6 Hjullås

De bakre hjulen är försedda med hjullås, för att hindra stolen från att rulla under patientförflyttning.

Lämna inte stolen och håll kontroll på den hela tiden. Använd inte hjullåsen som bromsar.

För att låsa, tryck ned den bakre delen av låsningspedalen.(Figur 18).

För att låsa upp ett hjullås, tryck ned den främre delen av låsningspedalen(figur 19).



Figur 18 - Låst hjullås



Figur 19 - Upplåst hjullås

6 - HUR MAN ANVÄNDER STOLEN

6.1 Innan man tar stolen i bruk

- Personal, som kommer att arbeta med stolen behöver läsa denna användarmanual.
- Då båren monteras, följ instruktionerna i Montering av stol (se sid. 10,11).
- Var varse att stolen fungerar som den ska. Följ instruktionerna i Inspektera stolen, sid 24.

6.2 Allmänna riktlinjer för användande

- När man använder stolen, behövs minst två utbildade bärare.
- Ferno rekommenderar en "tredje person " som övervakare.
- Bärare behöver hjälp när dom arbetar med tunga vikter (patient och utrustning). Se Använd Ytterligare Hjälp, sid 22, för rekommenderad placering av bärare och medhjälpare.
- Bärare arbetar tillsammans varje gång. Kommunera med varandra och koordinera era rörelser när ni sköter stolen.
- Följ standardmetoder för olycksfallspatienter, när du använder stolen.
- Stanna hos patienten hela tiden.
- Använd alltid patientbälten.

VARNING

När man använder stolen, behövs minst två utbildade bärare.

VARNING

En patient utan tillsyn kan skadas. Stanna hos patienten hela tiden.

VARNING

En icke fixerad patient kan falla ur stolen och skada sig. Använd bälten för att fixera patienten i stolen.

6.3 Förflyttning av patient

Bistå alltid patienten vid förflyttning ur/i stolen.

ASSISTANS TILL STOL

1. Veckla ut stolen och kontrollera att den är låst.
2. Lås hjullåsen på bakhjulen.
3. Se till att fotsteget är i viloläge.
4. Hjälpt patienten till stolen enligt gängse praxis, och följ lokala föreskrifter.
5. Spänn fast och justera överkroppen och knäbälten.
6. Sänk fotstödet och placera patientens fötter på det.

ASSISTANS UR STOL

1. 1. Spänn upp fotbältet.
2. Höj fotstödet till viloläge.
3. Spänn upp överkropp- och knäbälten.
4. Hjälpt patienten ur stolen enligt gängse praxis och följ lokala föreskrifter

6.4 Rullning av stol

RIKTLINJER

- Rulla stolen på mjuka, släta ytor så mycket som möjligt.
- För patientens komfort, drag stolen baklänges över låga hinder, som dörrtrösklar.
- Använd det justerbara lyfthandtaget och de teleskoperande handtagen för att lyfta och bära Modell 59 över trottoarkanter, hinder, skrovliga ytor och vild terräng.
- Använd larvfötter på Modell 59-T för att "glida".

FÖR ATT RULLA STOLEN

1. Huvudändans bärare: Lås upp hjullåsen.
2. Huvudändans bärare: Justera lyfthandtaget till bekvämlig höjd och fatta handtaget för att skjuta och styra stolen på alla sina fyra hjul.(figur 21), eller luta stolen bakåt och rulla den på bakhjulen.
3. Fotändans bärare: Hjälpt huvudändans bärare så mycket som möjligt och passa patienten.

Figur 20 - Patienten fixeras med bälten



Figur 21 - Rulla stolen



Figur 22 - Glida stolen nedför en trottoarkant.

6.5 Glida stolen nedför trapporna

ALLMÄNNA RIKTLINJER

- När man använder stolen, behövs minst två bärare. Använd ytterligare hjälp om det behövs för att styra stolen (se Använd Ytterligare Hjälp, sid 22).
- Ferno rekommenderar att de två bärarna är mittemot varandra, när dom transporterar en patient nedåt och att det finns en "tredje person" som övervakar. Emellertid får bäraren på fotändan ha ryggen åt patienten, om så önskas. Följ dina lokala föreskrifter.
- Avlägsna vatten, is, snö eller bråte från trappan innan du använder stolen på den.
- Avlägsna vatten, is, snö eller bråte från larvfötterna och dess bälten, innan du använder stolen på trappan.

GLIDA STOLEN NEDFÖR TRAPPAN

1. Huvudändans bärare: Rulla stolen till trappan och lås hjulen.
2. Fotändans bärare: Drag ut lyfthandtagen på fotändan till det önskade läget. Verifiera att båda handtagen är låsta.
3. "Tredje person": Stå nedanför fotändans bärare, med en hand på bärarens rygg för att stödja honom under hela "nedfarten".
4. Huvudändans bärare: Drag larvfötterna mot dig, tills larvfötterna låses upp. Se till att larvfötterna låses in i den nya positionen.
5. Huvudändans bärare: Hög det justerbara lyfthandtaget till önskad position och se till att den låses. (figur 23).
6. Huvudändans bärare: Lås upp hjulen (figur 23) och luta stolen bakåt.
7. Båda bärare: Led stolen över översta trappkanten tillsammans. Se till att larvfötterna kommer i kontakt med första trappsteget. (figur 24).

! VARNING

Om man använder stolen med olåsta larvfötter, kan det vålla skada. Se till att larvfötterna är låsta, innan man transporterar patienten.

! VARNING

Om man smörjer larvfötterna, kan patienten och/eller bärarna skadas. Smörj aldrig larvfötter eller bälten.



Figur 23 - Förbereda modell 59-T



Figur 24 - Larvfötterna är i kontakt med trapp-

8. Rör stolen långsamt nedåt tills larvfötterna står på två eller tre trappstegskanter. Det skapar en "glidvinkel"(figur 25).
9. För att behålla "glidvinkeln" under nedfarten, arbeta tillsammans så här:
 - Huvudändans bärare trycker lätt nedåt på det justerbara handtaget.
 - Fotändans bärare trycker lätt uppåt på lyfthandtagen på fotändan.
10. Båda bärare: När stolen når slutet av trappan och bakhjulen står på rak mark, så tippa huvudändans bärare stolen framåt tills alla fyra hjulen står på rak mark och fotändans bärare kan nu skjuta in lyfthandtagen (figur 26).
11. Huvudändans bärare: Skjut in larvfötterna och justera lyfthandtaget till en komfortabel höjd, och rulla sedan stolen.

PAUS UNDER NEDFART

För att pausa under nedfart, luta stolen framåt, precis så att bakhjulen vilar på trappsteget medan båda bärare håller stolen på plats (figur 27).

För att fortsätta nedför trappan, luta stolen tillbaka i "glidvinkeln" och låt larvfötterna få kontakt med trappan igen.



Figur 25 - Att uppnå "glidvinkeln"



Figur 26 - Att förbereda för rullning av stolen



Figur 27 - Pausa med stolen

6.6 Transport av patient nedför trappan

ALLMÄNNA RIKTLINJER

- När man bär stolen nedför trappan behövs minst två bärare. Använd ytterligare hjälp om så behövs (se Använd Ytterligare Hjälp, sid 22).
- Ferno rekommenderar att de två bärarna är mitt emot varandra, när dom transporterar en patient nedåt och att det finns en "tredje person" som övervakar. Emellertid får bäraren på fotändan ha ryggen åt patienten, om så önskas. Följ dina lokala föreskrifter.

HUR DU BÄR STOLEN NEDFÖR TRAPPAN

1. Huvudändans bärare: Rulla stolen till trappan och lås stolen.
2. Fotändans bärare: Höj fotändans lyfthandtag till önskat läge. Kontrollera att båda handtagen är låsta och bibehåll ditt grepp.
3. "Tredje person": Stå nedanför fotändans bärare med ena handen på bärarens rygg för att stödja och leda honom/henne under nedfarten.
4. Huvudändans bärare: Höj lyfthandtaget till önskat läge och se till att det är låst.
5. Huvudändans bärare: Lås upp hjulen och luta stolen bakåt.
6. Bärare och "Tredje person" : Bärare arbetar tillsammans för att lyfta stolen och bära den nedför trappan. "Tredje person" håller en hand på bärarens rygg och ger muntliga instruktioner. (Figur 28).

Märk: När du pausar, låt stolens bakhjul vila på ett trappsteg, medan båda bärare håller stolen på plats (Figur 29). När ni fortsätter nedför trappan, luta stolen bakåt och lyft/bär stolen.

8. Bärare: Vid slutet av trappan, sätter bärarna ned stolen på golvet och skjuter in lyfthandtagen.
9. Huvudändans bärare: Justera lyfthandtaget till önskat läge.



Figur 28 - Hur man bär Modell 59 nedför en trappa



Figur 29 - Pause i trappan - modell 59

6.7 Hur man transporterar patienten uppför en trappa – Modell 59 och Modell 59-T

ALLMÄNNA RIKTLINJER

- När man använder stolen, behövs minst två bärare. Använd ytterligare hjälp om det behövs för att styra stolen (se Använd Ytterligare Hjälp, sid 22).
- Ferno rekommenderar att de två bärarna är mitt emot varandra, när dom transporterar en patient nedåt och att det finns en "tredje person" som övervakar. Emellertid får bäraren på fotänden

HUR DU BÄR STOLEN UPPFÖR EN TRAPPA

1. Huvudändans bärare: Rulla stolen till början av trappan och placera stolen så att patienten har ryggen åt trappan
2. Huvudändans bärare: Hög lyfthandtaget till önskat läge och kontrollera att det är låst.
3. "Tredje person" : Stå ovanför huvudändans bärare med ena handen på bärarens rygg för att stödja och leda honom/henne under uppfarten.
4. Fotändans bärare: Hög fotändans lyfthandtag till önskat läge och se till att båda handtagen är låsta. (Figur 30)
5. Bärare och "Tredje person" : Båda bärare fattar lyfthandtaget och lyfthandtagen tillsammans för att bära stolen uppför trappan. "Tredje person" håller en hand på bärarens rygg och ger muntliga instruktioner. (Figur 31).
6. Båda bärare: Vid änden av trappan, sätter huvudändans bärare ned bakhjulen på golvet och rullar stolen baklänges tills framhjulen är säkert på golvet.
7. Fotändans bärare: Håll i handtagen.
8. Huvudändans bärare: Justera lyfthandtaget till önskat läge, innan du rullar stolen.



Figur 30 - Att förbereda för att bära Modell 59-T (med larvfötter) uppför en trappa

Viktigt

EZ Glide larvföttersystemet är designat för att bistå i nedförstrappor. Det kan användas uppför en trappa, men i vissa fall kan det vara lättare att bära/lyfta uppför en trappa.








Figur 31 - Att bära Modell 59 (utan larvfötter) uppför en trappa

6.8 Använd ytterligare hjälp

Det krävs minst två utbildade bärare för att hantera stolen. Ferno rekommenderar att bärare och medhjälpare på motstående ändar av stolen "står ansikte mot ansikte", när de förflyttar en patient uppför/nedför en trappa, och att en "tredje person" övervakar. Emellertid skall du följa dina lokala föreskrifter.

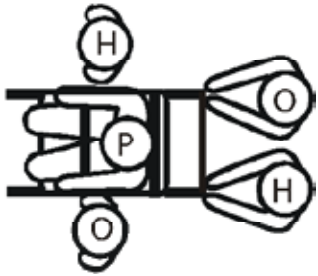De utbildade bärarna bör hålla kontroll på stolen och sköta reglagen.

Riktning	← Rulla på slät yta
Två bärare + två medhjälpare	

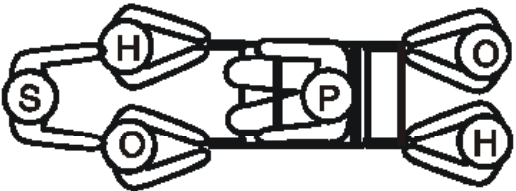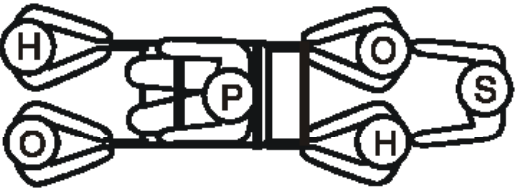Riktning	↙ Larvfötter nedför trappan eller bära stolen nedför trappan	↗ Bära uppför trappan
Två bärare + en medhjälpare		
Två bärare + tre medhjälpare		

Förklaring: O = bärare H = medhjälpare S = "Tredje person" P = patient

MAX LAST



Inspektera stolen om maxlasten har överskridits (se Inspektera stolen, sid 24)

! VARNING

Medhjälpare jab vålla skada eller skada sig. Håll kontroll på stolen, sköt reglagen och dirigera alla medhjälpare.

7 - UNDERHÅLL

7.1 Underhållsschema

Stolen kräver reguljärt underhåll. Rita och följ ett underhållsschema. Ett förslag på hur man praktiskt gör kan du se på sidan 34. Tabellen till höger ger minsta underhållsintervall.

När du använder underhållsprodukter, följ tillverkarens instruktioner och läs manualerna.

7.2 Desinfektion/tvätt av bälten

Fotbälte: Placera spänt bälte i en "nätkasse" och tvätta i tvättmaskin med varmt vatten, desinfektionstvål med mjuk rörelse. Häng upp bältet för att torka. Använd inte torktumlare.

Bröst- och knäbälten: Desinficera och tvätta enligt "bältesmanualen".

7.3 Desinfektion/tvätt av stolen

För att desinficera: Avlägsna bälten, säte, ryggplattor eller mjuka vinylöverdrag. Torka alla ytor på stolen och plattor eller överdrag med desinfektionsmedel. Följ anvisningarna.

För att tvätta: Tvätta plattor eller överdrag, och alla stolens delar med varmt vatten och en mild detergent. Skölj med rent vatten. Torka med en handduk eller lufttorka.

7.4 Tvätt av larvfötter och dess bälten

För att försäkra sig om bästa resultat är det viktigt att hålla larvfötter och bälten fria från olja, fett, smuts och bråte.

1. Separera bältena från larvfötterna när du tar bort bråte.
2. Tvätta båda sidor av larvfötterna och båda bältena, med "SD-20All-purpose Cleaner" och en ren trasa. Följ instruktionen på burken.
3. Torka ordentligt

Märk: För att beställa "SD-20All-purpose Cleaner", ring Spartan Chemical Company på telefonnummer 1.800.537.8990.

Minsta underhållsintervall	Vid varje användande	Vid behov	Varje månad
Desinfektion stol - s. 23	•		
Tvätt stol - s. 23		•	
Tvätt larvfötter - s. 23		•	
Inspektion stol- s. 24		•	•
Inspektion larvfötter- s. 24	•	•	
Smörjning stol - p. 25		•	

VARNING

Felaktigt underhåll kan vålla skada. Underhåll endast stolen enligt anvisningar i denna manual.

Viktigt

Desinfektionsmedel och tvättmedel, som innehåller blekmedel, fenol, jod kan skada stolen. Var försiktig när du desinficerar och tvättar med produkter som innehåller dessa kemikalier.

Viktigt

Vatten under högt tryck, eller ånga penetrerar leder, spolar bort smörjmedel, och medför korrosion. Var försiktig när du tvättar rörliga delar som leder och gångjärn.

Viktigt

Om man använder slipmedel eller påstrykare, kan det skada stolen. Använd inte slipmedel när du tvättar stolen.

7.5 Inspektera stolen

Låt underhållspersonal från Kundservice inspektera stolen vid jämna mellanrum. Larvfötter och dess bälten bör också inspekteras efter varje användning.

Följ checklistorna på denna sida och gå igenom hela stolens funktioner enligt denna manual.

Om man påvisar slitage och skador, får inte stolen vara i bruk tills reparationen är klar.

CHECKLISTA

FÖR MODEL 59-T OG MODEL 59 STOLER

- Finns alla komponenter?
- Är stolen fri från slitage?
- Är alla skruvar, bultar, nitar och sprintar på plats?
- Är alla rörliga delar rörliga
- Låser sig stolen i alla positioner?
- Rullar stolen som den ska?
- är bälten riktigt på plats?
- Är bältesväven i god kondition dvs. inga jack eller nötta kanter ?
- Är bältesspännen utan synliga skador och fungerar som de ska?
- Fungerar installerade tillbehör utan att störa stolsanvändandet?

CHECKLIST

FÖR LARVFÖTTER OCH DESS BÄLTEN

- Är larvfötter och bälten fria från smörjmedel, smuts och bråte?
- Är larvfötter och bälten utan synliga skador?
- Är inre bältesrepen synliga (vilket visar på att byte behövs)?
- Are the belt-tensioning bolts and nuts tight?
- Är bultarna/nitarna som spänner bältena åtdragna?
- Fungerar larvfötter och bälten som de ska?

7.6 Smörjning av stol – Modell 59-T och Modell 59

Desinficera och tvätta stolen, innan du smörjer.

Det finns två identiska smörjningspunkter på stolen. Dom är belägna precis där bussningen (i mässing) i hålet för låsmekanismen är i kontakt med löparen (i rostfritt stål), som tillhör stolsbenet. (Figur 32)

Smörj varje sådan punkt med en droppe SAE 30. vikt-solja. Sedan skjuter du låsmekanismen fram och tillbaka några gånger för att arbeta in oljan i löparen. Avlägsna överflödigt smörjmedel med SD-20 Tvättmedel.



Märk: För att beställa SD-20 Tvättmedel, ring Spartan Chemical Company på telefonnummer 1.800.537.8990.

7.7 Smörj inte larvfötterna på Modell 59-T

Smörj aldrig larvfötterna, dess bälten, eller någon annan del av larvföttersystemet. Smörjmedel på bälten eller larvfötter kan få stolen att bete sig på ett oförutsett sätt, vilket kan resultera i skada för patient och /eller bärare.

Ett märke (figur 33) är uppsatt på varje sida av larvfötterna, som uppmanar användaren att inte smörja larvfötterna. Om dessa märken skadas eller blir uttjänta, ersätt dom omedelbart (se Reservdelar och service, sid 30).

Om larvfötter och bälten tar upp olja eller fett när du använder den eller när stolen är inne på service, var god tvätta larvfötterna innan du använder stolen igen. Tvätta med SD-20 All-Purpose Cleaner. Se Tvätt av larvfötter och bälten, sid 23, för instruktioner.

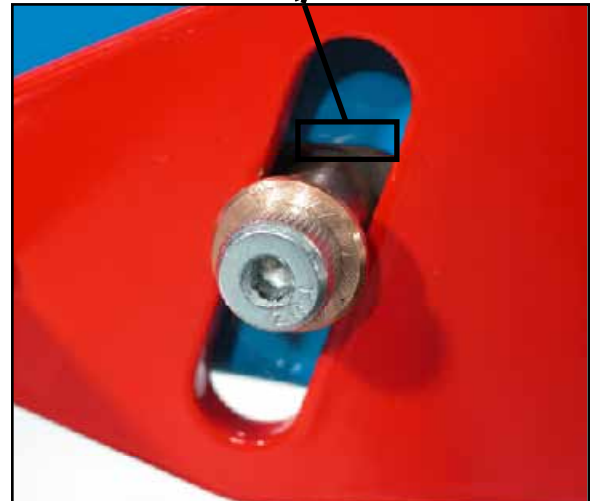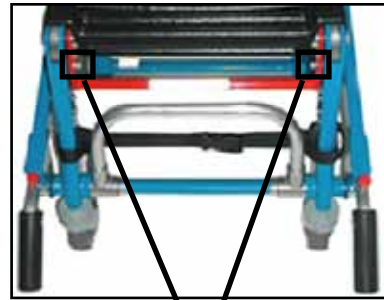

Figur 32-
Överst: Smörjpunkter
Nederst: Förstoring

! VARNING

Om man smörjer larvfötterna, kan patienten och/eller bärarna skadas.
Smörj aldrig larvfötter eller bälten.



Figur 33 - Märke på larvfötterna

7.8 Justering av sträckningen i bältet hos larvfötterna

NÄR MAN BEHÖVER JUSTERA BÄLTETS STRÄCKNING

Bältets sträckning behöver justeras när:

- a nut and bolt become loose
- a belt pulls away from the track more than 1-1/2 in. (3.8 cm) when measured using Method 1 on Page 27.
- a belt pulls away from the track more than 1 in. (2.5 cm) when measured using Method 2 on Page 27

Viktigt

Man måste vara två, när man justerar bältet.

VERKTYG

- 2 st.....7/16-inch skiftnyckel
 1 st.....#4 Phillips skruvmejsel
 1 st.....Linjal eller måttbånd

JUSTERING AV SPÄNNING

1. Öppna larvfötterna och lägg stolen på rygg på en arbetsbänk (se figur 24)


ELLER

Ställ stolen på dess hjul på arbetsbänken. Öppna sedan larvfötterna och lås upp båda hjullåsen.

2. Lossa bulten och svarta plastkåpan, belägen i ändan av larvfötterna (figur 35).
3. För in #4 Phillips skruvmejsel in i justeringsspringan (Figur 35).
4. Medan en person sträcker bältet med skruvmejseln för att dra larvföttershjulet mot toppen på larvfötterna, så använder den andra personen de båda skiftnycklarna för att justera. (Figur 36).



Figur 34 - Stolen i läge då man skall sträcka bältet

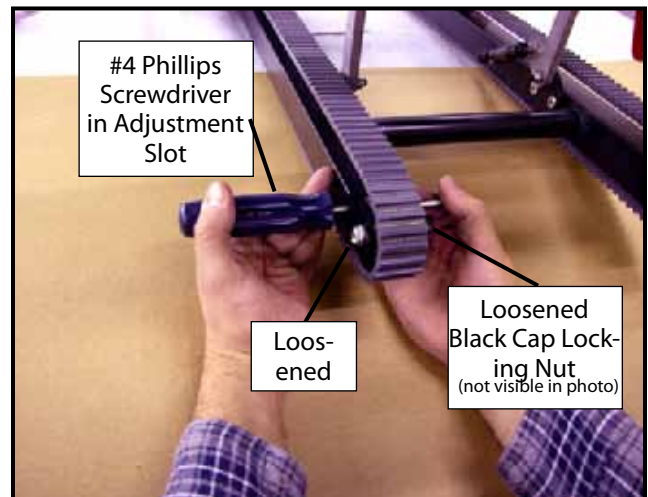

Figur 35 - Bältet kan nu spännas



Figur 36 - Bältet spännes

5. Det finns två metoder för att kontrollera bältesspänningen. Du kan använda vilken metod du vill, men kombinera inte stolpositionen från den ena metoden med mätområdet från den andra.

Använd metod 1 (nedan, till vänster) om stolen ligger på larvfötterna på arbetsbänken. Använd metod 2 (nedan, till höger) om stolen står på hjulen.

Man kan behöva upprepa spännandet och mätningen en eller flera gånger för att uppnå korrekt sträcknin

6. När bältet är korrekt spänt, avsluta med att dra åt bulten och niten för bibehålla sträckningen.
7. R e p e t e r e a s t e g 2 - 6 f ö r a t t s p ä n n a b a n d e n .

METOD 1

Stolen måste vila på larvfötterna

Fatta bältet vid dess mittpunkt och drag bältet ut från larvfötterna för att avlägsna eventuell slakhet. Sedan mäter du avståndet mellan den exponerade ytan av larvfötterna och den inre ytan av bältet. Mät vid mittpunkten.

Bältet är korrekt spänt när måtten är 1 – 1,25 inch (3.175 cm till 3.8 cm), som i figur 37.



Figur 37 - Spänningskontroll med stolen vilande på larvfötterna

METOD 2

Stolen måste stå på hjulen

Fatta bältet vid dess mittpunkt och drag bältet ut från larvfötterna för att avlägsna eventuell slakhet. Sedan mäter du avståndet mellan den exponerade ytan av larvfötterna och den inre ytan av bältet. Mät vid mittpunkten.

Bältet är korrekt spänt, när måtten är 0.75 – 1,00 inch (1.9 cm till 2.5 cm), som i figur 38.



Figur 38 - Spänningskontroll med stolen stående på hjulen

7.9 Reparation av bälten hos larvfötter

Bältena behöver repareras, när den inre ytan blir glastad eller glansig. När denna glansprocess pågår, börjar bältena röra sig mindre obehindrat över trappstegen och bälteständerna börjar hoppa, snarare än rulla över trappstegen.

REPARATIONSVERKTYG

- Markör
- 50 -80 grovkornigt sandpapper.
- Träblock

För att reparera bältena:

1. Placera stolen på arbetsbänken.
2. Lås hjulen.
3. Drag bältet bort från larvfötterna och märk den inre ytan med en permanent markör för att markera startpunkten för sandpappret.
4. Placera träblocket mellan bälte och larvfötter och rör blocket fram och tillbaka för att slipa inre ytan av bältet.(figur 40).


Märk: Slipa inte ytan på bältet.

5. Upprepa steg 3 och steg 4 med andra bältet.
6. Simulera en patientvikt och prova att glida stolen nedför en trappa för att testa huruvida bältet rullar som det ska.

Om så inte är fallet, behöver du upprepa sandpapperförfarandet eller så behöver du kanske ersätta dem.



Figur 39 - Markera startpunkten för att använda sandpapper

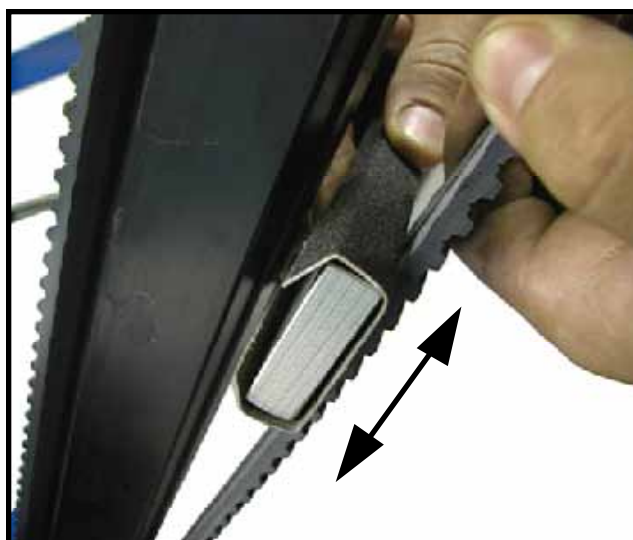

Figur 40 - Drag sandpappret i pilarnas riktning.

7.10 Ta bort eller fästa ABS plattor.

De gjutna ABS sätet och ryggplattan "knäpper" till på stolen.

RYGGPLATTAN

För att avlägsna ryggstödet: Tryck försiktigt nedåt på flänsen nära ett bottenhorn och drag hörnet bort från stolen (figur 41). Upprepa förfarandet vid motstående horn. Sedan glider du plattan ur spärrarna överst på stolen (figur 42).

För att fästa ryggstödet: Rikta plattan så att de horisontella hålen är högst upp. Glid de båda hålen i toppflänsen ner över spärren överst på ryggstödet. Tryck sedan de båda nedre hörnen på plattan mot stolsidorna tills det "knäpper" till i spärrarna.

SITTPANEL

För att avlägsna sittplattan: Drag uppåt på plattflänsen vid varje horn på framsidan för att lösgöra plattan från stolen. (figur 43). Sedan lyfter du bort plattan.

To attach the seat panel: align the panel with the chair frame and press down to snap the panel onto the frame.



Figur 41 - Lösgöra ett bottenhorn på ryggstödet



Figur 42 - Lyfta ryggstödet över spärrarna



Figur 43 - Lösgöra ett horn på sittplattan


7.11 Att avlägsna och fästa det mjuka vinylöverdraget

För att avlägsna:

1. Knäpp upp knappen vid varje hörn av överdraget överst på ryggstödet.(Figur 44).
2. Lägg stolen på ryggen och knäpp upp båda hållbanden under sätet(figur 45).
3. Knäpp upp de fyra knapparna på vinyl klaffen under sätet på framsidan av stolen.(figur 46)
4. Ta bort överdraget och rätta sedan upp stolen.

För att fästa:


1. Knäpp knappen vid varje hörn av överdraget överst på ryggstödet.
2. Lägg stolen på ryggen och spänn fast spännena på båda banden.
3. Knäpp upp de fyra knapparna på vinylklaffen under sätet på framsidan av stolen.
4. Drag i den fria änden av varje hållband tills bandet är sträckt(figur 47), rätta sedan upp stolen.

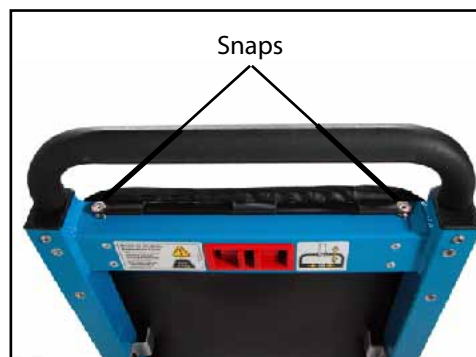

Figur 44 - Knäpp upp knappar



Figur 45 - Knäpp upp hållband

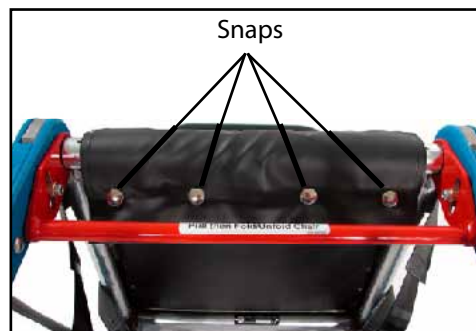

Figur 46 - Knäpp upp sittknappar



Figur 47 - Sträck hållbandet

8 - ACCESSOARER OCH RELATERADE PRODUKTER

Ferno erbjuder en hel uppsättning accessoarer (fästen, IV-pol, I-mobiliserare, filter etc.). Utvalda godkända artiklar, som kan användas tillsammans med stolen finns i listorna nedan.

Följ alltid medföljande instruktioner. Förvara instruktionerna med manualen. Se upp med speciella hänsynstaganden (lasthöjder, dörrbredder etc.) när du använder accessoarer.

Kontakta Ferno Kundkontakt (sid 34) eller din Ferno återförsäljare för produktinformation.

8.1 EZ Glide stol accessoarer

Beskrivning	Part #
Kwik Klip™ Restraint System	F059-0314002
IV Bag Holder Complete.....	F059IV
IV Bag Holder Replacement Strap	FR0821972
Headrest Complete.....	F059HEAD
Head Pad Replacement.....	FR0821971
Head Strap Replacement.....	FR0821970
Oxygen Cylinder Holder Complete.....	F059OX
Oxygen Cylinder Replacement Straps	FR0313661
Non-Locking Rear Lift Handles, Pair	FR0821974
Non-Locking Rear Lift Handle, Right	FR0822008
Non-Locking Rear Lift Handle, Left.....	FR0822007
Locking Rear Lift Handles, Pair	FR0821975
Locking Rear Lift Handle, Right.....	FR0822010
Locking Rear Lift Handle, Left.....	FR0822009
Secure Mount Storage Brackets (with spring release).....	F059SECURELOCK
Storage Bracket (with hooks).....	FR0822073
Vinyl Storage Cover	F059COVER

VARNING

Om man fäster felaktiga produkter på stolen kan det vålla skada. Använd bara produkter som är godkända av Ferno.

8.2 Bälten

Beskrivning	Part #
Ankle Restraint	FR082-1973
430 Restraint, 2-piece, 5 ft., black, metal buckle.....	F4302SORT
430 Restraint 2-piece, 7 ft., black, metal buckle.....	F43027SORT
430-P Restraint 2-piece, 5-ft., black, plastic buckle	F4312SORT
416 Restraint, 2-piece, 5 ft., black, metal rescue-style buckle	FR0313928
416 Restraint, 2-piece, 7 ft., black, metal rescue-style buckle	FR0313999
Coated Restraint, 2-piece, 5 ft., green nonabsorbent straps, metal buckle	FRE32032

Märk: Modellerna 430 och 430-P bälten finns också i 5- och 7-foot längder i färgerna bourgogne eller orange.

9 - RESERVDELAR OCH SERVICE

9.1 Reservdelar och service- USA och Kanada

För att beställa reservdelar eller för att anlita professionell reparation i USA, kontakta EMSAR- det enda av Ferno auktoriserade ombud, som sköter, servar och reparerar Ferno produkter. Fabriksutbildade EMSAR-tekniker använder reservdelar godkända av Ferno och godkända reparationsmetoder. EMSAR har en franchise-plats för dig. Angående detaljer, ring, faxa eller besök EMSAR:s websida.

1.800.73.EMSAR (Telefon)
1.937.383.1051 (Fax)
www.EMSAR.com (Internet)

9.2 Reservdelar och service- överallt i världen

För att beställa Ferno reservdelar och om du är i behov av professionell reparation, kontakta din Ferno återförsäljare. Din återförsäljare är det enda Ferno auktoriserade ombud, som sköter, servar och reparerar Ferno produkter.

9.3 Reservdelslista

Ref. #	Beskrivning	Dels#
1	ABS Backrest panel	FR1901489
2	Track-close push handle	FR1901500
3	ABS Seat panel.....	FR1901490
4	Seat bumper, pair w/hardware (n/v)	FR1901501
5	Telescoping handle assy, blue	FR0905837
6	Telescoping handle, grip only.....	FR1901495
7	4" front caster, complete.....	FR1901494
8	Rear brake assy, right	FR0905838
9	6" rear wheel w/hardware	FR1901493
10	Ankle Restraint	FR0905840
11	Track lower roller w/hardware	FR1901498
12	Rear brake assy, left (n/v).....	FR0905839
13	Track belt only.....	FR1901496
14	Track upper roller w/hardware	FR1901497
15	Lift bar lock assy.....	FR1901492
16	Lift bar handle, complete	FR1901491
17	Soft Vinyl Seating.....	FR0905841
18	Gas spring assy (n/v)	FR1901499
19	Label sheet and logo (n/s).....	FR1901502



! VARNING

Felaktiga reservdelar och felaktig service kan vålla skada. Använd bara Ferno reservdelar och service, som är godkänd av Ferno.

! VARNING

Om man modifierar stolen kan det vålla kroppsskada och stolskada. Använd bara stolen på det sätt som den är avsedd för.

Ref. #	Beskrivning	Part #
20	Telescoping handle assy, red.....	FR0905842
21	Telescoping handle assy, orange	FR0905843
22	Telescoping handle assy, green.....	FR0905844
23	Telescoping handle assy, platinum	FR0905845

(n/s) = icke visad

(n/v)= icke visad på detta foto

9.4 Parts Diagrams



10 - BEGRÄNSAD GARANTITID

Begränsad garantitid. Sammanfattning

Ferno produkter skall vara fria från materialfel och tillverkningsfel i ett år, förutom:

- Yttre beläggning (gel,färg,puder,dekaler etc.) har en garantitid på 90 dagar.
- Mjuka produkter (bältesväv, vinyl, skum, etc.) har en garantitid på 90 dagar.
- Fiberglas AquaCiser tankar är garanterade mot läckage i 5 år.
- Rostfria hydroterapitankar är garanterade mot läckage och rost i 5 år.
- Begravningsprodukter(förutom hydrauliska delar och mjuka delar)har en garantitid på 2 år.
- Ambulansbårar och ambulanstransportmedel(förutom yttre beläggning coh mjuka delar) har en garantitid på 2 år.
- EZ Glide TM Chairs har en garantitid på 2 år.
- EMS påsar(utbytbar botten exkluderad) och ryggstöd är garanterade på livstid.
(Skada som uppkommer pga missbruk, felaktig användning eller oaktsamhet, kan repareras till en rimlig kostnad. Kostnaden uppges före reparation.)

Fernos reparationer har en garantitid på 90 dagar från första reparationsdagen.

Dessa garantitider gäller bara om produkten används enligt givna instruktioner. Garantitiden börjar när produkten fraktas från Ferno eller när den ankommer, förutsatt att du kan visa leveranskvitto. Fraktkostnader täcks inte av garantin. Ferno kan inte göras ansvariga för skador under frakt eller ådragna skador pga användning.

Icke-Ferno produkter som säljs av Ferno behåller de tillverkarens ursprungliga garantier. Ferno erbjuder inte fler garantier utöver tillverkarens, ej heller är Ferno ansvarig för andras tillverkade produkter.

Garantikrav

Om man har bevisat att produkten är skadad, så kommer Ferno att reparera produkten eller ersätta den, eller om Ferno så behagar, betala tillbaka. Under inga omständigheter är Ferno ansvarig för mer än produktens försäljningspris. Köparen accepterar dessa förhållanden i alla skadetillfällen.

11 - FERNO NORDEN KUNDTJÄNST

Kundtjänst och produktssupport är viktiga aspekter på en Fernoprodukt. Var god uppge stolens tillverkningssnummer, när du ringer en återförsäljare eller Ferno Kundtjänst. Ange även tillverkningsnumret i all skriftlig kommunikation.

För assistans och hjälp, kontakta Ferno NordenKundtjänst tel. 0520 - 420 200 eller fab@fernonorden.com



Serienummer _____

