

BRUKSANVISNING



## Rekomenderat tillvägagångssätt för CHI tillsammans med Scoop EXL

### A – För in bottenplattan under patientens huvud



Person 1 fixerar patientens huvud enligt lokala protokoll.




Person 2 för bottenplattan under patientens huvud.



Person 2 förbereder Scoopbåren

### B – Låsning av Scoop® EXL

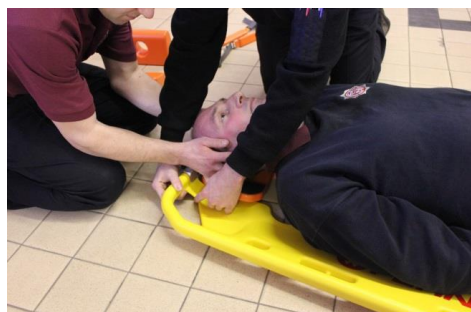


Person 2 låser ihop Scoopbårens över lås, tillse att bottenplattan är kvar under patientens huvud..



Person 2 låser därefter scoopbårens fotända.

OBS: underlaget och miljön bestämmer vilken ända som först skall låsas. Man kan även använda sig av sk: Saxlåsning där båren är låst i en ända och förs upp mot patienten i en v-form.

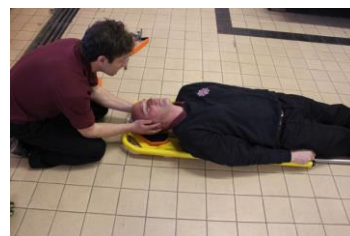

Person 2 applicerar nu huvudkuddarna.



Det är inte meningen att fixera bottenplattan med remmar, de är avsedda för applicering på Backboards.

### C – Applicera Pann/Hakremmar



Förbered remmen så den inte är tvinnad



Lägg remmen över huvudstödet



Fäst nedre (hak) remmen på bägge sidor



Fäst övre (pann) remmen på bägge sidor



Efterspänn alla remmar så att huvudstödet ligger stadigt

## Alternativ metod för Scoop®EXL



## Fästa CHI bottenplatta till Backboards

CHI bottenplatta kan fästas \*permanent\* på backborden.

1. Fäst den över remmen på bottenplattans övre del, Notera att bilderna visar plattan med övre delen nedåt.





Fäst bottenplattan enligt bilderna på backboarden



Sätt fast den nedre remmen enligt bilderna:

